

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**BALKONIK SKŁADANY 3-FUNKCYJNY RF-131**

Nr katalogowy.:	RF-131
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Regulacja wysokości:	790 mm – 965 mm
Maksymalna szerokość:	570 mm
Waga:	2,6 kg

 **UWAGA!** Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik składany 3-funkcyjny przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych osób ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z balkonika upewnić się, że:
 - wysokość balkonika jest odpowiednio wyregulowana,
 - balkonik jest odpowiednio złożony,
 - mechanizmy blokujące i przyciski działają poprawnie,
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie,
 - wszystkie stopki balkonika ustawione są na tej samej wysokości.
2. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga, itp.
3. Podczas chodzenia nie przesuwaj balkonika bez lekkiego unoszenia, ponieważ takie użytkowanie spowoduje uszkodzenie gumowych nasadek.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie korzystać z balkonika podczas chodzenia po schodach chyba, że zostaniesz odpowiednio przeszkolony przez specjalistę.
6. Korzystanie z balkonika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów co w efekcie może spowodować uszkodzenie balkonika.
7. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
8. Nie przechowywać balkonika w temperaturze poniżej 0°C.

 **UWAGA!** Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.


⚠ UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmują ramy balkonika.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA

Aby rozłożyć:

- 1 Postaw balkonik przed sobą opierając go na przednich stopkach.
- 2 Odchyl obie boczne ramy balkonika do momentu zablokowania się przycisku C-clip na środku ramy poprzecznej. (rys. 2)

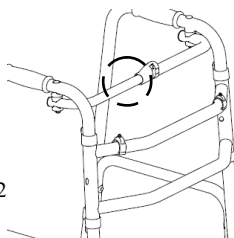

Aby złożyć:

- 1 Wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku ramy poprzecznej (rys. 2). Spowoduje to zwolnienie blokady.
- 2 Trzymając wciśnięty przycisk złoż obie boczne do środka.

rys. 2

FUNKCJONOWANIE


Balkonik pomaga w utrzymaniu stabilności podczas poruszania się i pozwala na stałą podporę użytkownikowi. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom może pełnić funkcję balkonika: kroczącego, przestawnego lub z przednimi kołami.

USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ FUNKCJI

A) KROCZĄCA

1. Aby ustawić balkonik na funkcję kroczącą przełóż obydwie klamry blokujące w otwory na ramie poprzecznej. (rys. 3)


rys. 3

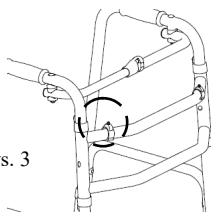

B) PRZESTAWNA


1. Aby ustawić balkonik na funkcję przestawną przełóż obydwie klamry blokujące do otworów znajdujących się na ramie bocznej. (rys. 4)

rys. 4

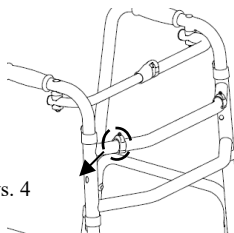

C) MOBILNA


1. Aby ustawić balkonik na funkcję mobilną załóż kółka w miejsce przednich stoppek:
 - a) Naciśnij przycisk zabezpieczający c-clip, delikatnie stopkę i ściągnij ją z ramy balkonika.
 - b) Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce z kółkiem, nasuń stopkę na ramę balkonika. tak przycisk blokujący wskoczył w otwór.

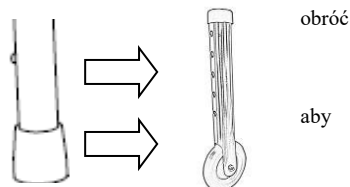

c) Wyreguluj odpowiednią dla Ciebie wysokość (patrz regulacja wysokości).

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający (rys. 6) na stopce i obróć ją delikatnie.
2. Wyreguluj stopkę na odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

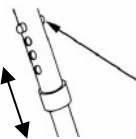

rys.6

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość ,
 - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić,
 - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.

⚠ UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.

⚠ UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdatności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00,
fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl



**KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK SKŁADANY 3-FUNKCYJNY RF-131**

Model chodzika:	Numer fabryczny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Urządzenie objęte jest 18-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady urządzenia zostaną usunięte w okresie gwarancyjnym bezpłatnie przez producenta pod warunkiem, iż urządzenie było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w INSTRUKCJI OBSŁUGI.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty przyjęcia urządzenia do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją urządzenia opisane w instrukcji obsługi,
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny okładziny, sprężyny, paski, linki, itp.,
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.,
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Przed oddaniem urządzenia do Punktu Serwisowego urządzenie należy wyczyścić zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, tak aby nadawało się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Kupujący będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄDY/NAPRAWY *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					

